

## **Dezinfectant de nivel înalt concentrat pentru instrumentar Bionet AG**

### **Utilizare**

Produs pentru dezinfecția de nivel înalt instrumentarului medical, chirurgical, stomatologic și de diagnostic, prin imersie la temperatura ambientă. Dezinfecțează suprafetele prin stergere (pereti și pardoseli) din săli de operatie, cabine medicale.

### **Compozitie**

Didecyldimethylammonium chloride 5%, Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides 5%, Glutaral 5%, Alcool etilic, Alcool izopropilic, Apa purificata, Parfum.

### **Activitate biocida**

Instrumentarul se imerezează în soluția de lucru realizată prin diluarea a 25 ml de Bionet AG în 10 L apă (0.25%), se obține astfel un efect bactericid și fungicid după un timp de contact de 15 min conform standardele EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 1275, EN 1650, EN 13624. Prin diluarea a 50 ml de Bionet AG în 10 L apă (0.5%) se obține o soluție cu efect virucid la 60 min conform standardul EN 14476. Prin diluarea a 100 ml în 10 litri apă (1%) se obține un efect tuberculocid și micobactericid la 15 min conform standardul EN 14348 (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium). Sporicid conform standardului EN 13704, 10% la 60 min..

### **Mod de utilizare**

Se pre-dezinfecțează și se curăță de resturi organice instrumentarul cu Desogerm 3A Net. După care se dezinfecțează prin imersia instrumentarului în soluția de lucru cu Bionet AG. Se clătește bine instrumentarul cu apă destilată după operația de dezinfecție.



- **Elimina 99.99% din bacterii, fungi, levuri, mycobacterii și virusi.**
- **Pentru dezinfecția la rece a instrumentarului medical, chirurgical, stomatologic și de diagnostic..**

Dezinfectant pentru instrumentar și dispozitive medicale.	Dezinfectant general pentru suprafete	0.25-10% (2,5-100ml/1L) În funcție de spectrul de activitate de acoperit	Bactericid, fungicid, levuricid, mycobactericid, tuberculocid, virucid, sporicid